

Attends® Adjustable

Commande:
Keller Diffusion Sàrl
Fax: 032 559 83 80
info@kellerdiffusion.com

Attends® Adjustable

Sécheresse fiable.

Suisse:

Attends GmbH
Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden

Service de commande et livraison
Lohmann & Rauscher AG
Oberstrasse 222, 9014 St. Gallen

Conseils d'incontinence
Tel: 061 833 30 90
Fax: 061 833 30 99
beratung@attends.ch

Commandes
Tel: 0844 844 410
Fax: 0844 844 430
info@ch.LRMed.com

www.attends.ch

	tour de taille cm	pièces paquet / carton	EAN paquet / carton *7332152	Pharmacode (CH) No. LiMA (CH)
Attends Adjustable 10 Medium	80-110	28/4x28	*206249/ *206256	5260533
Attends Adjustable 10 Large	110-140	28/4x28	*206263/ *206270	5260556

Comme la plupart des autres produits Attends pour l'incontinence grave / totale, Attends Adjustable a un double noyau super absorbant avec Quick-Dry. L'urine est rapidement absorbée et enfermée dans le produit. La « Active Zone » dans la région entrejambe garantit une absorption élevée là où c'est important. Donc, la surface sèche rapidement, ce qui garde la peau au sèche, une protection supérieure contre les fuites et une valeur pH bonne pour la peau. Les matériaux micro-aérés augmentent le confort du port. L'« Odour Protection » empêche la formation des odeurs désagréables.



Nouveauté Attends: produit d'incontinence seyant, ajustable individuellement. Avec ceinture élastique pour encore plus de sécurité.




Maintenant Attends offre un produit que vous pouvez adapter à l'anatomie de chacun d'une manière optimale.

Contrairement aux produits d'incontinence traditionnels le Attends Adjustable peut être mis de différentes manières – selon les besoins spécifiques de soin.

Quel est le secret? Des matériaux ultra modernes, élastiques et une coupe discrète.

Grâce à la ceinture douce et élastique le Attends Adjustable s'adapte à la forme du corps de manière individuelle et reste discret. Les bandes auto agrippantes une fois fermées procurent une fixation fiable, mais peuvent être réouvertes et réajustées pour une fixation qui répond le mieux au besoins des utilisateurs puisqu'elles peuvent être placées n'importe où sur la face avant du produit.

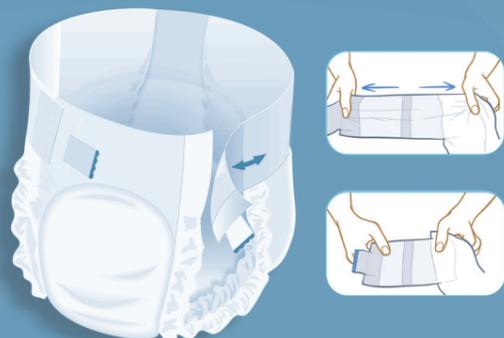

Mise en place du produit:

Attends Adjustable peut être mis de différentes manières. Les trois façons citées fonctionnent assis, debout ou couché. Peu importe quelle manière vous choisirez : Attends Adjustable peut être adapté individuellement au corps grâce à la ceinture élastique et aux bandes auto-agrippantes refermables.

1. Commencez toujours en ouvrant le produit et en formant un canal longitudinal avec la couche.

2. Passez le produit ouvert entre les jambes. Positionnez le produit au siège et au ventre et fermez les côtés.

3. Fermez d'abord un côté du produit avant de le mettre. Passez la première jambe dans le produit. Montez maintenant le produit complètement et fermez le deuxième côté. Repositionnez les bandes auto-agrippantes si nécessaire.

4. Fermez préalablement les deux côtés avant de mettre le produit. Passez les deux jambes dans le produit et montez-le. Repositionnez les bandes auto-agrippantes pour un port optimal.

Les bandes auto-agrippantes peuvent être ouvertes et refermées à tout moment selon besoin.

Une multitude de personnes professionnelles de santé en Europe et au Canada ont déjà testé les Attends Adjustable dans le quotidien des soins ...

... et ont parlé avec nous de leurs expériences.

Plus de 120 patients et plus de 60 aides-soignants en Europe et au Canada ont testé et évalué le Attends Adjustable de septembre 2011 à mars 2012.

... Voici le témoignage d'un utilisateur:

il était d'accord pour tester le Attends Adjustable et en parler.

“ Il est très simple à mettre - même assis. Pour ça je passe le produit à une jambe avant de le monter et de le fixer. ”

“ Mes patients étaient très contents que le produit soit tellement doux et agréable sur la peau. ”

“ Grâce aux ailes élastiques, le produit est très utile même dans des situations difficiles. ”

“ La nuit, je peux contrôler très facilement si le produit doit être changé. J'ouvre le côté, regarde et le referme à nouveau. ”

“ J'en ai déjà beaucoup testés durant mes 38 ans de travail dans les soins mais le Attends Adjustable est celui qui me plaît le plus. Il fonctionne vraiment: chouette ! ”

“Je n'ai plus le contrôle sur ma vessie, donc j'ai besoin d'un produit d'incontinence jour et nuit. Avoir un produit performant représente pour moi une bonne qualité de vie. Le produit que j'utilisais avant fonctionnait bien et me laissait suffisamment de liberté de mouvement tant qu'il était sec. Mais à partir du moment où il était mouillé, la protection n'était plus proche du corps ce qui n'était pas agréable. Parce que le produit avait perdu sa tenue initiale, je devais le changer. A cause de ça je consommais trop de produits. Le Attends Adjustable m'a surpris d'une manière très positive. Tous les problèmes que j'avais avec les autres produits ont disparu avec Attends. La manière de mettre le produit et comment on peut le remonter plus haut et l'ajuster selon besoin est très confortable. Comme ça il est toujours près du corps et ne frotte pas. Mais le plus important c'est que le Attends Adjustable est tellement fiable, cet aspect est vraiment super. Pour cette raison je le recommanderais absolument et le préfère à mon ancien produit.”