

Säkra och effektiva behandlingar



Courtesy of Prof Drosner

Ytliga blodkärl - Före och efter 2 behandlingar




Courtesy of Jens Petersen

Diffus rodnad - Före och efter 3 behandlingar



Courtesy of Jens Petersen

Ytliga blodkärl - Före och efter 3 behandlingar

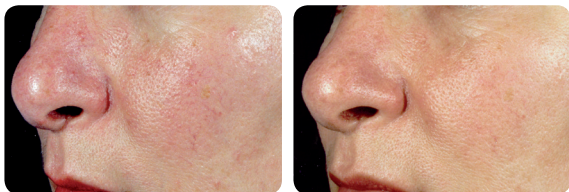

Courtesy of Prof Drosner

Ytliga blodkärl - Före och efter 1 behandling



Courtesy of Dr. Silvia B. Cesa

Ytliga blodkärl - Före och efter 1 behandling



Se behandling

Ytliga blodkärl

KLINISKT PRÖVAD
SÄKER OCH EFFEKTIV



Ellipse A/S

Agern Allé, 11 DK-2970
Hørsholm, Denmark
+45 45 76 88 08

www.ellipse.com

 ellipselasers.wordpress.com
 facebook.com/Ellipse.Denmark
 youtube.com/ellipsedenmark

Available from:

Nagelfyren
Maria Borgkvist
Fot, laser & nagelterapeut
www.nagelfyren.com

Ellipse is a producer of light-based solutions for medical and cosmetic conditions. Ellipse has gained the acclaim of doctors and beauticians worldwide for the quality of products and services. © Ellipse A/S. All rights reserved.

1PLT7082-A03



Advanced I²PL & Laser
skin solutions



Är du besvärad av ytliga blodkärl i ansiktet?

Du behöver inte längre bekymra dig över ytliga blodkärl i ansiktet. Dessa tunna kärl (kallas telangiectasias) runt näsan eller på kinderna är små blodkärl nära hudens yta som ofta är en följd av solexponering. Ibland uppträder kärlen som ett enda rött område.

Hur fungerar en behandling med Ellipse?

Korta säkra stötar av IPL-ljus (kallad I²PL teknik av Ellipse, men kallas oftast laser) riktas mot huden. Systemet filtrerar ljuset för att säkerställa de våglängder som absorberas av hemoglobinet i blodet i dina kärl. Ljuset omvandlas till värme som förstör proteinet i kärlväggen, vilket leder till att kärlen gradvis försvinner efter behandling. För att säkerställa bästa möjliga överföring läggs ett tunt lager gel (som används vid ultraljudsundersökningar) på huden innan behandlingen.

Vilka blodkärl kan behandlas?

De vanligaste behandlingarna är ytliga blodkärl i ansiktet. Behandlingarna är mest effektiva på patienter med ljus hud som inte är solbränd vid tidpunkten för behandlingen. Om huden är mindre solbränd blir kontrasten mellan blodkärlet och bakgrundsfärgen på huden större, vilket gör behandlingen enklare. Men, Ellipse har förprogrammerade inställningar för olika hudtyper som levererar rätt energi för din just din hy.

Hur lång tid tar en behandling med Ellipse?

Flera blodkärl kan riktas i en ljusblixt. Behandlingstiden beror på området och de många olika blodkärl som skall behandlas. En enda session varar vanligtvis i 15-20 minuter.

Behöver jag vidta särskilda försiktighetsåtgärder före och efter behandling?

Det är viktigt att undvika solbränna (sol, solarium eller brun-utan-sol-produkter) före och under behandlingsperioden. Annars kommer din solbrända hud att absorbera mer ljus, vilket gör behandlingen mindre effektiv och bekväm. Det är också en god idé att undvika rökning i 4 timmar före behandling. Generellt är ingen speciell vård nödvändig efter behandlingen, men personer med känslig hud kan lägga på en kall kompress (en kall fuktig trasa) på det behandlade området direkt efter behandlingen eller använda en salva föreskriven av läkare. Efter behandlingen bör du undvika solexponering i 30 dagar, även om det inte finns några tecken på inflammation i det behandlade området. Använd solskydd (minst SPF 30) om solexponering inte kan undvikas.

Hur många behandlingar krävs?

Antalet behandlingar beror på placering och blodkärl som skall behandlas. Kliniska studier har bekräftat att 1-3 behandlingar brukar krävas och dessa sker med ca 1 månads mellanrum.

Gör det ont?

Ingen bedövning krävs och många patienter beskriver behandlingen som praktiskt taget smärtfri, som en snärt från en gummisnodd på huden, följt av en värmekänsla liknande den du känner efter en dag på stranden.

Hur kan jag vara säker på att behandlingen är säker och effektiv?

Kliniska tester som dokumenterar Ellipse säkerhet och effektivitet har utförts av ledande läkare före lanseringen av behandlingarna och dessa har dokumentationer har publicerats i respekterade, refererande medicinska tidskrifter. Du är välkommen att läsa dessa vetenskapliga dokument på Ellipse webbsida www.ellipse.com.