


VoiceBuddy

De ALDS

Le meilleur ceinturon-amplificateur
vocal, tout simplement

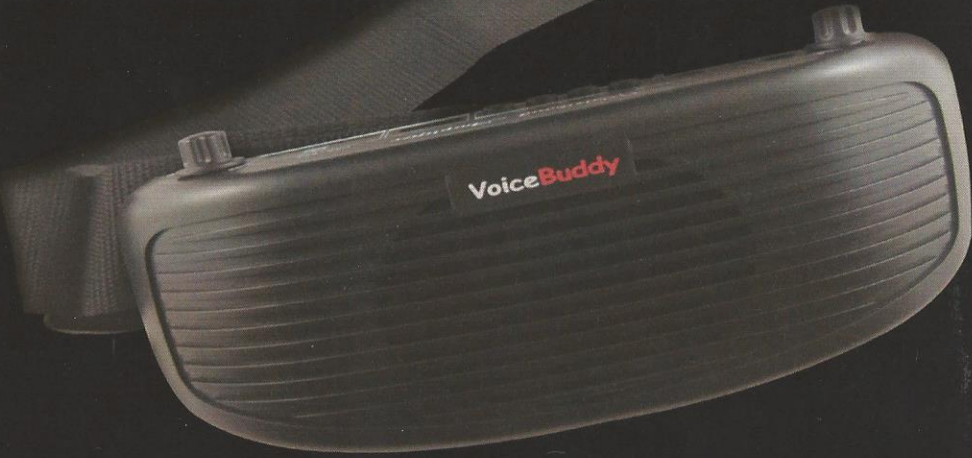

Distribué par :



J-VOX Distributing

4187 Weimar Line, Wellesley, ON N0B 2T0

E-mail: tpj@cwisp.ca
www.jvoxistributing.com

Cell: 519-575-2770
Fax: 519-699-0008


VoiceBuddy

De ALDS

Ceinturon-amplificateur
multi-fonction



Manuel d'utilisation

ALDS 

Manuel d'utilisation de VoiceBuddy

Félicitations, vous venez d'acquérir votre VoiceBuddy!

Le VoiceBuddy permet aux personnes qui ont des difficultés vocales permanentes ou temporaires, d'augmenter le rendu de leur voix à un niveau correct pour elles-mêmes et leur public. Un outil efficace au quotidien, qui sert à réduire les niveaux de stress et d'effort liés à la communication vocale.

Votre VoiceBuddy augmente le rendu de votre voix jusqu'à 24dB de puissance sonore supplémentaire, grâce à l'oreillette avec micro intégré 652-HM100NI. Il offre à l'utilisateur un meilleur confort, à son public un son plus clair, de la vie à la musique, et cela en suivant les quelques instructions très simples détaillées dans le présent manuel.

Le VoiceBuddy est recommandé pour les personnes ayant subi une laryngotomie, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de SLA et de SP, et se révèle la solution idéale pour celles et ceux qui souffrent de déficience ou de troubles de la voix permanents ou temporaires.

Vous allez pouvoir apprécier tout le confort et la commodité du VoiceBuddy et son véritable poids plume, sa portabilité, et toutes les options multi-fonction proposées.

www.alds.com



VoiceBuddy

Inclus dans le kit complet

Modèle : VB10WB



VB10CC
VoiceBuddy
Sac de
transport



HM100 NI
VoiceBuddy
Oreillette avec
micro intégré



VB10BC
VoiceBuddy
Chargeur de
batterie



VB10AC
VoiceBuddy
Câble audio



VB10SS
VoiceBuddy
Courroie
d'épaule



VB10LM
VoiceBuddy
Micro de
revers

Instructions d'utilisation du VoiceBuddy :

Rechargement du VoiceBuddy pour la première fois :

Votre nouveau VoiceBuddy est muni d'une batterie durable au lithium de 7,4V. Il est indispensable de recharger cette batterie une première fois de manière prolongée avant de l'utiliser de façon régulière. Avant cette recharge, vous pouvez tester sur des temps courts votre nouveau VoiceBuddy, mais afin de maximiser la durée de vie totale de votre batterie, vous devez la recharger une première fois pendant au moins 12 heures.



1 : Insérer la mini-prise du chargeur de batterie dans le port de charge situé sur le dessus du VoiceBuddy marqué : DC 9V



2 : Brancher l'adaptateur AC à une prise de courant active.

3 : Recharger le VoiceBuddy pendant 12 heures uniquement lors de la première recharge, entre 3 et 4 heures lors de chaque recharge suivante.

Pendant la recharge, l'indicateur lumineux LCD clignote en vert et rouge.

Lorsque la recharge est terminée, cet indicateur lumineux se stabilise sur le vert.

Après une recharge complète, utiliser l'appareil jusqu'à ce que l'indicateur de batterie devienne rouge avant de procéder à une nouvelle recharge, cela pour respecter les cycles de charge de la batterie.

Le cycle de vie de la batterie suite à une recharge complète est d'environ 6 à 8 heures. La durée exacte dépend essentiellement de votre utilisation, notamment la puissance d'amplification demandée.


La batterie durable au lithium a une espérance de vie totale d'environ deux ans. La durée de vie effective dépendra essentiellement de votre utilisation, de la puissance d'amplification demandée, et des habitudes de recharge.

Pour changer la batterie de votre VoiceBuddy :

Retirer la plaque arrière de l'appareil afin de faire apparaître la batterie au lithium. La batterie dispose d'un branchement direct et très simple, similaire à la plupart des batteries de téléphone portable.

VoiceBuddy
Batterie au lithium

Modèle
653-VB10BAT

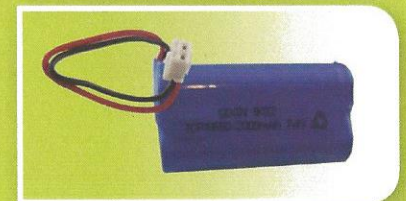

Porter l'amplificateur VoiceBuddy sur vous :

Le VoiceBuddy est équipé d'un ceinturon large pour assurer une fixation confortable. On le porte normalement sur le devant comme un sac-banane. Assurez-vous de le placer sur vous correctement et de manière sûre, pour éviter que l'appareil ne tombe sur le sol.


En utilisant une carte SD, une clé ou mémoire USB, ou un lecteur MP3, vous pouvez jouer de la musique, ou une présentation audio pré-enregistrée sur votre VoiceBuddy. Cela peut se révéler très utile pour les professeurs de musique et les entraîneurs, ou simplement pour passer de la musique.

Utilisation du microphone :

Le micro-casque VoiceBuddy 652-HM100NI est conçu dans le but d'éliminer le retour audio, les grincements et crissements. Avec n'importe lequel des microphones VoiceBuddy, nous vous recommandons de garder le récepteur à 2 ou 3 cm de votre bouche afin d'assurer un son d'une plus grande clarté.

Pour vous aider à éliminer les bruits du retour audio, gardez le micro et le haut-parleur d'amplification vocale aussi éloignés que possible l'un de l'autre. N'allumez pas votre VoiceBuddy tant que vous n'avez pas positionné fermement le micro. Placez le micro-casque autour de l'arrière de votre tête et faites-le reposer sur le haut de vos oreilles. Orientez le micro de manière à ce qu'il reste à 2 ou 3 cm de votre bouche.

Une fois le micro bien en place, allumez le VoiceBuddy, et augmentez progressivement le volume jusqu'au niveau souhaité.

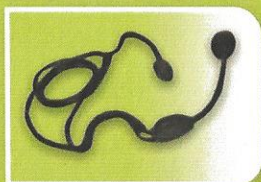

652-HM100NI : Oreillette avec micro intégré

- * Mains-libres, microphone cordiforme de haute qualité à élimination de bruit.
- * Excellent contrôle du bruit ambiant.
- * Confort optimal en usage quotidien. Idéal pour les professeurs & présentateurs.



652-EH1 : Microphone-Oreillette

- * Poids-plume, couleur chair, parfait pour un usage professionnel.
- * Forme adaptée à votre joue et à votre oreille.



652-MM100 : Microphone Stylo

- * Stylo-microphone et interrupteur Marche/Arrêt.
- * Haute sensibilité avec large éventail dynamique.



652-MIC 054 : Microphone de Revers

- * Mini-microphone directionnel avec clip de revers de veste.



652-CM200 Microphone Tour de Cou

- * Microphone tour de cou polyvalent haute performance.
- * Tour de cou flexible, s'adapte instantanément aux différentes tailles de cou.
- * Aucun contact avec la tête ou les cheveux, confort maximal assuré.

* Microphone Tour de Cou

Veillez noter : les mouvements de la tête trop amples de gauche à droite ont tendance à modifier grandement le rendu du son. Des mouvements de tête limités assurent les meilleurs résultats avec le micro tour de cou.



652-Microphone de Gorge à Conduction Transdermique

- * Permet à l'utilisateur de répercuter sa voix, même en chuchotant, avec une qualité sonore supérieure.
- * Confortable et flexible avec moins de pression sur le cou.

* Microphone transdermique de cou :

Veillez noter : du fait de la haute sensibilité du micro transdermique de cou, l'usage de ce micro avec des applications d'amplification des voix normales n'est pas recommandé.

Ce micro est destiné à permettre aux personnes atteintes de difficultés d'élocution graves de bénéficier de l'amplification offerte par le VoiceBuddy.

Notez aussi que le positionnement du micro transdermique de cou est tout un art. Chaque personne a, au niveau du cou, un petit endroit où le son de la voix est le plus clair et le plus intelligible. Il faut donc commencer par trouver cet endroit magique en procédant par élimination. Le plus souvent, cet endroit se situe là où la chair est épaisse, hors de l'axe du larynx en position normale.



652-MIC 014 Micro-prise omni-directionnel

- * Parfait en usage combiné avec le VoiceBuddy d'ALDS et les amplificateurs TalkAbout.



901-WCA007WC Câble d'extension microphone

- * Câble d'extension micro de 12 pieds.

Astuce :

• Faites attention, à l'approche de surfaces réfléchissantes rigides (comme par exemple, un professeur qui s'approche du tableau), la voix de l'intervenant peut avoir tendance à revenir vers le micro, et créer de l'écho, du larsen, ou des sons non désirés. Ce phénomène de retour peut être évité en faisant glisser le VoiceBuddy sur votre côté, et en direction du public.


Professeurs

Entraîneurs

Coachs

Instructeurs

Guides de tourisme

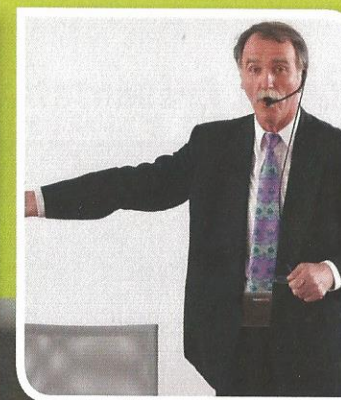


Artistes interprètes

Présentateurs

Intérieur/Extérieur

+ Parfait pour les problèmes d'élocution

Waistband Amplifier

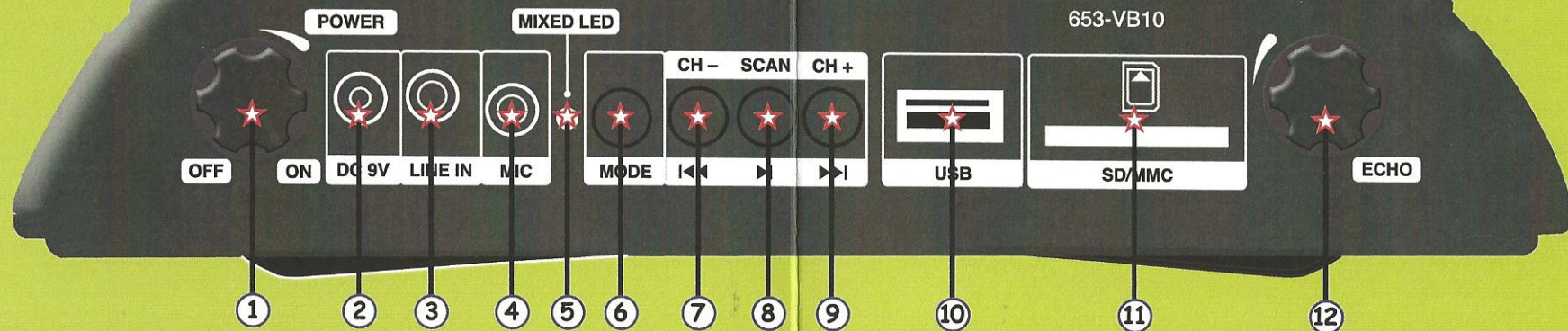

1 - Interrupteur Marche/Arrêt et Contrôle du volume.

2 - Prise jack de rechargement de la batterie.

(Appareil fonctionnant avec adaptateur secteur 9V/500mA)

3 - Entrée ligne 3,5 mm pour connexion de sources audio externes.

(Quand le port audio externe est utilisé, les sources sonores USB/SD/FM sont coupées automatiquement).

4 - Entrée microphone 3,5 mm.

5 - Indicateur LED.

(a) Lumière BLEUE fixe = Marche ou Pause.

(b) Lumière BLEUE clignotante = Lecture.

(c) Lumière BLEUE clignotant rapidement = Scan des canaux FM en cours.

(d) Lumière ROUGE fixe = Batterie faible, doit être rechargée.

(e) Lumière clignotante ROUGE & BLEUE = Batterie en mode charge.

6 - Sélection des modes USB, SD ou FM.

7 - En mode FM : appuyez pour passer au canal précédent.

En mode USB/SD : appuyez pour accéder au fichier précédent.

En mode USB/SD/FM : maintenez enfoncé pour baisser le volume.

8 - En mode FM : appuyez pour scanner les canaux, et appuyez de nouveau pour sauvegarder automatiquement.

En mode USB/SD : appuyez pour jouer ou mettre en pause.

9 - En mode FM : appuyez pour passer au canal suivant.

En mode USB/SD : appuyez pour accéder au fichier suivant.

En mode USB/SD/FM : maintenez enfoncé pour augmenter le volume.

10 - Port USB : jusqu'à 32 Go max.

11 - Port pour carte SD : jusqu'à 32 Go max.

12 - Contrôle de la tonalité.

VoiceBuddy - Amplificateur Vocal

Malgré les difficultés, la voix amplifiée

VoiceBuddy : Professeurs & Présentateurs




Témoignage :

Je voudrais sincèrement vous remercier de m'avoir orientée sur le VoiceBuddy. J'ai reçu mon "copain" hier, et je l'ai utilisé toute la journée. Et même si c'est vendredi, j'ai l'impression d'avoir la voix que j'ai le lundi ! ;o)

Je suis vraiment enthousiasmée. Merci encore.

C'est un produit absolument génial, et je le recommande chaudement. Je vais aussi écrire un courriel à notre coordinateur régional, qui est en contact avec de nombreux professeurs de musique. A mes yeux c'est un superbe produit. Un grand merci pour votre soutien sur tous les aspects d'un problème déjà réglé : retrouver ma voix, toute ma voix. Je me sens bien plus positive quant à l'avenir.

Rosemary Warhurst
Coordinatrice Musique
Ecole Primaire
Pacific Pines

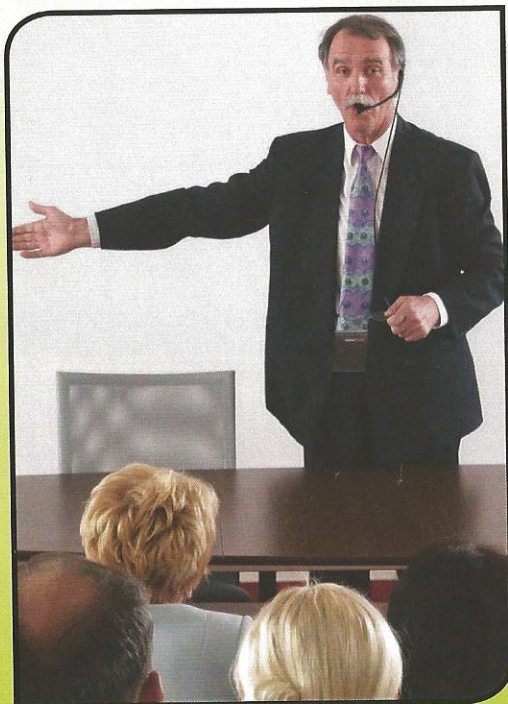

VoiceBuddy :

- Professeurs de gym • Coachs • Entraîneurs
- Guides de tourisme
- Usage en intérieur/extérieur



Offre une amplification vocale jusqu'à 50 m.
(si champ libre)

Caractéristiques :

- Port d'entrée audio pour connexion d'équipements audio externes
 - Circuit imprimé de technologie semi-conducteurs
 - Batterie durable et rechargeable au lithium
 - Contrôle de la tonalité voix et du volume
 - Poids-plume, large ceinturon sûr et confortable équipé d'un clip facile
 - Port USB, capacité jusqu'à 32 Go de matériel audio
 - Port pour carte SD, capacité jusqu'à 32 Go de musique
- VoiceBuddy choisi par les professionnels

