

## Aperçu du produit :



- 1 : **Témoin de batterie**  
vert lorsque la batterie est suffisamment chargée ; rouge lorsque la batterie est faible.
- 2 : **Molette de mise sous tension (Marche/Arrêt) et d'amplification**  
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre sous tension et/ou augmenter le volume ; tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume et/ou mettre hors tension.
- 3 : **Entrée micro/casque**  
prise jack standard, 3,5 mm, mono.
- 4 : **Témoin de charge**  
rouge lorsque le chargement est en cours ; vert lorsque la batterie est chargée ; éteint lorsque le chargeur n'est pas connecté.
- 5 : **Entrée secteur**  
utiliser uniquement le chargeur ALDS fourni.

## Spécifications :

- \* Dimensions : 85 (L) x 85 (l) x 35 (p) mm
- \* Poids : **175 g** (batterie comprise)
- \* Voltage : **6 V**
- \* Jusqu'à 8 watts de puissance audio
- \* Jusqu'à 20 dB avec le microphone tour de cou **HM900NI**

Distribué par :

# MiniBuddy

## Instructions d'utilisation



**ALDS**  
MiniBuddy

L'amplificateur vocal le plus petit au monde

## Introduction :

Félicitations, vous venez d'acquérir votre **MiniBuddy** d'ALDS.

Le **MiniBuddy** d'ALDS est un amplificateur vocal mis au point pour celles et ceux qui souffrent d'une affection de la voix temporaire ou permanente. L'utilisation du **MiniBuddy** permet d'obtenir un niveau sonore confortable lorsque vous parlez, afin de faciliter la communication orale quotidienne tout en réduisant les niveaux de stress et de déformation vocales.

Le **MiniBuddy** d'ALDS peut amplifier la voix jusqu'à 6 fois sans écho lorsqu'il est utilisé avec le micro/casque HF d'ALDS (MB8HM) ou le micro tour de cou ultra-léger (NM900NI).

- \* Avec des batteries NiMH respectueuses de l'environnement, pouvant être rechargées en une nuit.
- \* Molette de mise sous tension et d'amplification simple d'utilisation.
- \* Port en bandoulière, à la ceinture ou à l'épaule grâce à sa sangle réglable.
- \* Témoin de charge et de mise sous tension unique.
- \* Etui de protection du **MiniBuddy** avec passant pour port à la ceinture.

Le **MiniBuddy** peut être utilisé en toute confiance pendant 4 à 8 heures en fonction des besoins d'amplification. Plus l'amplification requise est élevée, plus la batterie est sollicitée, plus le déchargement est rapide.



## MiniBuddy - Informations de garantie

**Garantie :** garantie limitée d'un an

ALDS offre une garantie contre les défauts de fabrication de l'amplificateur vocal personnel **MiniBuddy** pour une période de douze mois à compter de la date d'achat. Les batteries NiMH et les microphones intégrés sont garantis pour une période de six mois à compter de la date d'achat.

La garantie s'applique à l'utilisateur d'origine et les périodes susmentionnées démarrent à la date indiquée sur le reçu ou la facture d'achat.

### Exclusions :

La garantie ne couvre en aucun cas les dommages subis par l'appareil ou ses composants, ou les dysfonctionnements causés par la chaleur excessive, l'humidité, les chocs, l'utilisation non conforme, le mauvais entretien, le mauvais chargement, l'usage inhabituel ou les modifications apportées à l'appareil.

### Remplacement ou réparation sous garantie :

Si un ou des dysfonctionnements surviennent, l'amplificateur vocal **MiniBuddy**, les batteries, les microphones, ou tout autre accessoire seront remplacés ou réparés et ce, à la discrétion du fabricant.

### Procédure de garantie :

- Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir de l'aide. Si vous souhaitez trouver un revendeur près de chez vous, contactez ALDS au 1-866-845-2537 pour obtenir de l'aide.
- Les appareils envoyés pour révision, remplacement ou réparation doivent être complets, avec tous leurs composants et accessoires.
- Les appareils envoyés pour être révisés ou réparés doivent être correctement emballés afin de les protéger lors du transport.
- Veillez préciser sur papier libre votre nom, adresse, numéro de téléphone de contact en journée, ainsi qu'une description du problème, et joindre une copie de la facture d'achat ou du reçu.

Dépôt d'usine pour garantie/réparation :



3180-216th. St. Langley, BC V2Z 2E6